

Interplex® Safecard

Zeckenkarte

Produktinformation

Interplex® Safecard ist ein Hilfsmittel zur Zeckenentfernung.

Anwendung

Die Interplex-Zeckenkarte mit der kurzen Spalt-Ecke oder der langen Spalt-Nase gleichmäßig zwischen Zecke und Haut schieben, dabei die Karte nicht anheben. Das Loslösen des Parasiten ist deutlich zu fühlen, die Zecke incl. Kopf und Beißmandibeln bleibt dabei komplett im Kartenspalt hängen.

Falls während des Entfernens Abwehrbewegungen des Wirtstieres auftreten, sollte die Haut anschließend auf Kopfreste überprüft werden. Abwehrbewegungen entstehen überwiegend durch die Fixation des Tieres, da das Lösen der Zecke vom Wirtstier nicht schmerzhaft ist.

Hinweis

Die Zecke sollte anschließend vernichtet werden um jeglichem erneuten Verbeißen in einem anderen Wirtstier vorzubeugen.

Handelsform

10 x 1 Stück

