



## Zitzenstifte mit Perle und separatem Vaseline-Depot Für Tiere: Rinder

### Produktinformation

Wollzitzenstifte unterstützen die Behandlung von Verletzungen der Zitze. Sie verringern die Gefahr von Verklebungen im Strichkanal, bei Wunden im Bereich der Zitzenkuppe, begleitend bei Verletzungen, nach Operationen und anderen Schädigungen der Zitze. Der verwendete gespaltene Doppelfaden ist besonders weichelastisch und stark saugfähig. Die Wollzitzenstifte haben die Abmessungen von rund 51 mm Länge und 6 mm Durchmesser und sind an einem Ende mit einer roten Perle versehen. Die antibiotikafreie Gleitsalbe befindet sich anwenderfreundlich und hygienisch in einem extra abgeteilten Fach der Dose.

### Anwendungsempfehlung

1 - 2 mal täglich bis zur Heilung nach dem Milchablassen oder Melken je einen neuen Stift in den Strichkanal einführen, dabei sollte dringendst auf keimarmes Vorgehen besonders geachtet werden.

Möglichst nicht bei vorübergehend trockengestelltem Euterviertel anwenden.

Sollte dies aus medizinischen Gründen notwendig sein, sollte der Wollzitzenstift nicht länger als 2 - 3 Tage im Strichkanal belassen werden.

### Hinweis

Vor dem Einführen des Wollzitzenstiftes in die Zitze ist die Perle auf festen Sitz zu überprüfen.

### Handelsform

Dose mit 20 Stück

